



diasend[®] Clinic

– Guida rapida per iniziare

glooko

Indice

Individuare il dispositivo.....	3-4
Come iniziare a utilizzare diasend® Clinic	5
Inserire diasend® Transmitter nella presa di alimentazione	5
Il dispositivo diasend® Transmitter è pronto all'uso quando:.....	5
Collegare il dispositivo del paziente al dispositivo diasend® Transmitter.....	6
Trasferire i dati	6
Effettuare l'accesso al proprio account diasend® Clinic.....	6
Visualizzazione dei dati	7
Creare un profilo paziente e salvare i dispositivi del paziente	7
Visualizzazione dei dati dai dispositivi del paziente	8
Condivisione dei dati.....	9
Invitare i pazienti a caricare i dati da casa	9
Creare report e convertirli in PDF.....	9
Spiegazione degli indicatori del diasend® Transmitter:.....	10
Comportamento del Transmitter quando tutto funziona in modo corretto:.....	10
Elenco dispositivi compatibili.....	11

Trovare il dispositivo



Glucometro



CGM



Pompa per insulina



Penna per insulina

Abbott

 FreeStyle	11
FreeStyle Flash.....	11
FreeStyle Freedom.....	11
FreeStyle Freedom Lite.....	11
FreeStyle InsuLinx	11
FreeStyle Lite.....	11
FreeStyle Mini	11
FreeStyle Optium.....	11
FreeStyle Optium H.....	11
FreeStyle Optium Neo	11
FreeStyle Papillon.....	11
FreeStyle Papillon InsuLinx	11
FreeStyle Papillon Lite.....	11
FreeStyle Papillon Mini	11
FreeStyle Papillon Vision	11
FreeStyle Precision.....	11
FreeStyle Precision H	11
FreeStyle Xido	11
Optium Mini	11
Optium Xceed	11
Optium Xido.....	11
Precision Xceed	11
Precision Xtra	11
 FreeStyle Libre	11
FreeStyle Navigator.....	19
FreeStyle Navigator II	11

Acon Laboratories

 On Call® Advanced	12
On Call® Plus.....	12
On Call® Resolve.....	12
On Call® Vivid.....	12

AgaMatrix

 WaveSense Jazz™.....	12
--	----

Animas

 IR1200	20
IR1250	20
2020.....	20
OneTouch Ping.....	20
OneTouch Vibe Plus.....	20
Vibe	20

Apex Bio

 GlucoSure Extra.....	12
GlucoSure Max.....	12

Arkray

 GlucoCard 01.....	12
GlucoCard Expression	12
GlucoCard Shine.....	12
GlucoCard Vital.....	12
GlucoCard X-meter.....	12
GlucoCard X-mini plus	12
Relion Confirm.....	12
Relion Prime.....	12

Ascensia (Bayer)

 Breeze 2.....	12
Contour.....	12
Contour link.....	12
Contour next.....	12
Contour next link.....	12
Contour next link 2.4.....	12
Contour next one.....	12
Contour next USB.....	12
Contour plus one.....	12

Contour TS	12
Contour XT	12
Contour USB.....	12

Beurer

 GL50 evo.....	13
---	----

B. Braun

 Omnitest 5.....	13
---	----

Cambridge Sensors

 Microdot+.....	13
--	----

Dexcom

 G4 Platinum	13
G5 receiver.....	13
SEVEN PLUS.....	13

Diatesse

 XPER.....	13
---	----

Everymed

 EveryX3.....	13
---	----

ForaCare

 FORA Diamond MINI.....	19
FORA Diamond Prima.....	13

GE

 GE100	13
---	----

GlucoRx

 HCT & Ketone.....	14
Nexus.....	14
Nexus Mini	14
Nexus Mini Ultra.....	14
Nexus Voice.....	14
Q.....	14

iCare

 PalmDoc I.....	14
PalmDoc II	14

Infopia

 Element.....	14
Finetest Lite.....	14
GlucoLab.....	14
Gluneo	14

Insulet

 OmniPod.....	20
--	----

i-SENS

 alphacheck professional NFC/ACURA PLUS	14
alphacheck professional.....	14
COOL/Bravo	14
CareSens BGMS/TEE2.....	14
CareSens N.....	14

CareSens N POP.....	14
CareSens N Voice.....	14

Inside Biometrics

 KEVA Smart.....	14
---	----

LifeScan

 OneTouch Ping.....	15
OneTouch Select.....	15
OneTouch Select Plus.....	15
OneTouch Select Plus Flex.....	15
OneTouch Ultra.....	15
OneTouch Ultra2.....	15
OneTouch UltraEasy.....	15
OneTouch UltraMini.....	15
OneTouch UltraSmart.....	15
OneTouch Verio.....	15
OneTouch Verio (old).....	15
OneTouch Verio Flex.....	15
OneTouch Verio IQ.....	15
OneTouch Verio Pro.....	15
OneTouch Verio Sync.....	15
OneTouch Vita.....	15

Medcore

 Care.....	15
GlucoSure Extra.....	15
GlucoSure Max.....	15

Menarini

 GLUCOCARD MX.....	15
GLUCOCARD SM.....	16
GLUCOFIX iD.....	15
GLUCOFIX miò.....	16
GLUCOFIX miò Plus.....	16
GLUCOFIX Premium.....	16
GLUCOFIX TECH.....	15
GlucoMen areo.....	15
GlucoMen areo 2K.....	15
GlucoMen G+.....	16
GlucoMen Gm.....	15
GlucoMen LX.....	16
GlucoMen LX2.....	16
GlucoMen LX Plus.....	16
GlucoMen READY.....	16
GlucoMen Visio.....	16

Mendor

 Discreet.....	16
---	----

Nipro

 TRUE METRIX.....	16
TRUE METRIX AIR.....	16
TRUEresult.....	16
TRUEyou.....	16
TRUEyou mini.....	16

Nova

 Max Link.....	16
Max Plus.....	16

Pendiq

 pendiq.....	22
---	----

Prodigy

 AutoCode.....	16
---	----

Roche

 Accu-Chek Active.....	17
Accu-Chek Aviva.....	18
Accu-Chek Aviva Combo.....	18
Accu-Chek Aviva Connect.....	17
Accu-Chek Aviva Expert.....	18
Accu-Chek Compact.....	18
Accu-Chek Compact Plus.....	18
Accu-Chek Guide.....	17
Accu-Chek Instant.....	17
Accu-Chek Instant S.....	17
Accu-Chek Mobile (IR).....	18
Accu-Chek Mobile (USB).....	17
Accu-Chek Nano.....	18
Accu-Chek Performa Connect.....	17

 Accu-Chek Insight.....	21
Accu-Chek Spirit.....	21
Accu-Chek Spirit Combo.....	21

Sanofi

 BGStar.....	17
MyStar Extra.....	17

Senseonics

 Eversense CGM Transmitter.....	17
---	----

SOOIL

 DANA Diabecare R.....	22
---	----

Smiths Medical

 CoZmo 1700.....	20
---	----

Tandem

 t:flex.....	20
t:slim.....	20
t:slim X2.....	20
t:slim G4.....	20

Terumo

 Finetouch.....	17
--	----

ViCentra

 Kaleido.....	20
--	----

Wellion

 Calla Dialog.....	17
Calla Light.....	17
Calla Mini.....	17
Calla Premium.....	17
Linus.....	17

Ypsomed

 mylife Pura.....	17
mylife Unio.....	17

 mylife OmniPod.....	20
---	----

Guida rapida

diasend® Clinic

diasend® offre agli operatori sanitari una soluzione online che raccoglie e archivia in un unico punto i dati dei pazienti diabetici senza dover installare nessun software. Le informazioni caricate, trasmesse dal dispositivo via cavo, Bluetooth, infrarossi o tramite app, sono disponibili online in tempo reale in un account sicuro diasend.com. I dati provenienti da più dispositivi vengono uniti e presentati in un unico report.

Come iniziare a utilizzare diasend® Clinic

- 1 Inserire diasend® Transmitter nella presa di alimentazione



- 2 Il dispositivo diasend® Transmitter è pronto all'uso quando:



1. L'indicatore verde ok ha smesso di lampeggiare.
*Se lampeggia lentamente significa che il transmitter si sta avviando.
Se lampeggia velocemente significa che il transmitter è in fase di aggiornamento.*
2. L'indicatore blu send lampeggia lentamente.

i Nota: se si dispone di un hub USB collegato al dispositivo diasend® Transmitter, tenere presente che l'hub USB deve essere alimentato con il proprio alimentatore.

i Nota: consultare pagina 10 per una spiegazione esaustiva degli indicatori sul diasend® Transmitter.

3 Collegare il dispositivo del paziente al diasend® Transmitter



Ogni dispositivo del paziente si collega in una delle tre seguenti modalità:

- Cavo USB (porta USB o hub USB).
- Bluetooth (richiede un dispositivo Bluetooth specifico).
- Infrarossi (ricevitore IR incorporato o per alcuni dispositivi un cavo SmartPix).

i Per istruzioni specifiche su come caricare tutti i dispositivi del paziente compatibili, vedere pagina 11 di questa guida.

4 Trasferire i dati



1 Collegare il dispositivo del paziente. L'indicatore blu send lampeggerà rapidamente durante il caricamento dei dati.

2 Attendere finché l'indicatore blu send smette di lampeggiare velocemente e l'indicatore verde ok si accende.

3 Quando l'indicatore verde ok è acceso, è possibile effettuare l'accesso su www.diasend.com e visualizzare i dati o continuare a caricare altri dispositivi del paziente. Cliccare su Pagina di aggiornamento se l'accesso è già stato effettuato. Poiché il dispositivo diasend® si basa su cloud, è possibile rivedere i dati caricati in qualsiasi momento.

5 Effettuare l'accesso al proprio account diasend® Clinic



Andare all'indirizzo www.diasend.com per accedere a diasend® e recuperare i dati caricati.

6 Visualizzazione dei dati

Clinica

← Nella scheda Clinica è possibile visualizzare i dati senza creare un profilo paziente.

Orario	Paziente	Numero serie	Ultima glicemia	Ultimi chetoni	Selezione
09:42	Pierce, Annette	7910778 (Bayer Contour)	13/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:16	Powell, Arlene	8229504 (Bayer Contour)	14/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:40	Peterson, Dave	4188077 (Bayer Contour)	02/08/2011	-	<input type="checkbox"/>

Spuntare la casella dei dati caricati che si desidera visualizzare.

1

Cliccare su Mostra unità selezionate per visualizzare l'upload.

2



Nota: i dati caricati vengono rimossi dalla vista Clinica dopo la mezzanotte dello stesso giorno, ma non vengono cancellati.

7 Creare un profilo paziente e salvare i dispositivi del paziente

Sono disponibili due modalità per creare un profilo paziente. Nella scheda Clinica e nella scheda paziente.

Clinica

← Come creare un profilo paziente nella scheda Clinica:

Orario	Paziente	Numero serie	Ultima glicemia	Ultimi chetoni	Selezione
09:42	Pierce, Annette	7910778 (Bayer Contour)	13/03/2011	-	<input type="checkbox"/>
10:16	Powell, Arlene	8229504 (Bayer Contour)	14/03/2011	-	<input type="checkbox"/>

Spuntare la casella dei dati da caricare per i quali si vuole creare un profilo paziente.

1

Cliccare qui per creare un profilo paziente per il dispositivo selezionato.

2



Si consiglia di utilizzare questo metodo per registrare i dispositivi di un paziente, in modo da evitare di inserire manualmente il dispositivo del paziente nella scheda paziente.

Pazienti ← Come creare un profilo paziente nella scheda paziente:

Cliccare su Nuovo paziente.

1

I campi obbligatori sono quelli relativi a nome e cognome. Sono disponibili ulteriori opzioni alla voce Espandi modulo di registrazione.

2

Per consentire al paziente di visualizzare i dati da casa, spuntare la casella: "Consente al Paziente di effettuare il login al sistema diasend® e di visualizzare i report"

- Se lo si fa durante il processo di registrazione è necessario creare un nome utente e una password per il paziente.
- Se si spunta la casella dopo aver creato un account paziente, si noterà che diasend® avrà già creato un nome utente. In questo caso è necessario creare solo la password.

3

Una volta terminato cliccare su: "Salva informazioni sul paziente".

4

8 Visualizzazione dei dati dai dispositivi del paziente

Glicemia



CGM

Insulina

Confronto

Elaborazione dati

I dati sono mostrati nelle cinque schede qui sopra, da cui è possibile accedere ai dati relativi a glicemia, CGM e insulina. Fare riferimento al documento diasend® Report reference guide sul nostro sito per ulteriori dettagli sui nostri report.

9 Condivisione dei dati

Grazie all'account diasend® Personal i pazienti possono caricare i propri dispositivi a casa e possono condividere i dati caricati con fino a due strutture sanitarie. Per condividere i dati i pazienti avranno bisogno di un identificativo univoco in diasend® chiamato "Identificativo clinico". Si trova alla voce "Profilo account" > "Collegamenti paziente".

Profilo conto

Collegamenti paziente

Identificativo clinico

10 Invitare i pazienti a caricare i dati da casa

Abbiamo aggiunto un pulsante di invito nell'applicazione web per semplificare a cliniche e pazienti la condivisione dei dati. Questo significa che le cliniche possono invitare i pazienti a caricare i dati da casa.

Invita un paziente

11 Creare report e convertirli in PDF

Ci sono due modi per generare un report in pdf. È possibile cliccare sull'icona "Stampa a PDF" per generare un report della visualizzazione corrente. Oppure è possibile cliccare sul pulsante Wizard PDF per generare un report con variabili predefinite. È possibile regolare questo strumento alla voce "Impostazioni".

Wizard PDF

Stampa a PDF

Spiegazione degli indicatori del diasend® Transmitter:



ok

- **LAMPEGGIAMENTO LENTO**
L'indicatore ok lampeggia lentamente quando il dispositivo Transmitter si collega alla rete GSM.
- **LAMPEGGIAMENTO VELOCE**
Il dispositivo Transmitter si sta aggiornando. L'indicatore ok lampeggia rapidamente e per un periodo di tempo prolungato. È possibile iniziare a utilizzare il dispositivo Transmitter quando l'indicatore blu send ricomincia a lampeggiare lentamente.
- **LUCE ACCESA FISSA**
L'indicatore segnala un caricamento avvenuto correttamente.


send

- **LAMPEGGIAMENTO LENTO**
Il dispositivo Transmitter è pronto all'uso.
- **LAMPEGGIAMENTO VELOCE**
I dati sono in fase di caricamento.

error

- **LUCE ACCESA FISSA**
L'indicatore segnala che l'ultimo caricamento non è avvenuto correttamente. Dovuto probabilmente a causa di problemi temporanei relativi alla rete wireless GSM. Provare a caricare di nuovo il dispositivo del paziente.
- **LAMPEGGIAMENTO VELOCE**
L'indicatore lampeggia insieme all'indicatore ok quando il dispositivo Transmitter non trova una rete. È possibile verificare l'intensità e la qualità del segnale alla voce "Profilo account" all'interno del proprio account.

Comportamento del diasend® Transmitter quando tutto funziona in modo corretto:

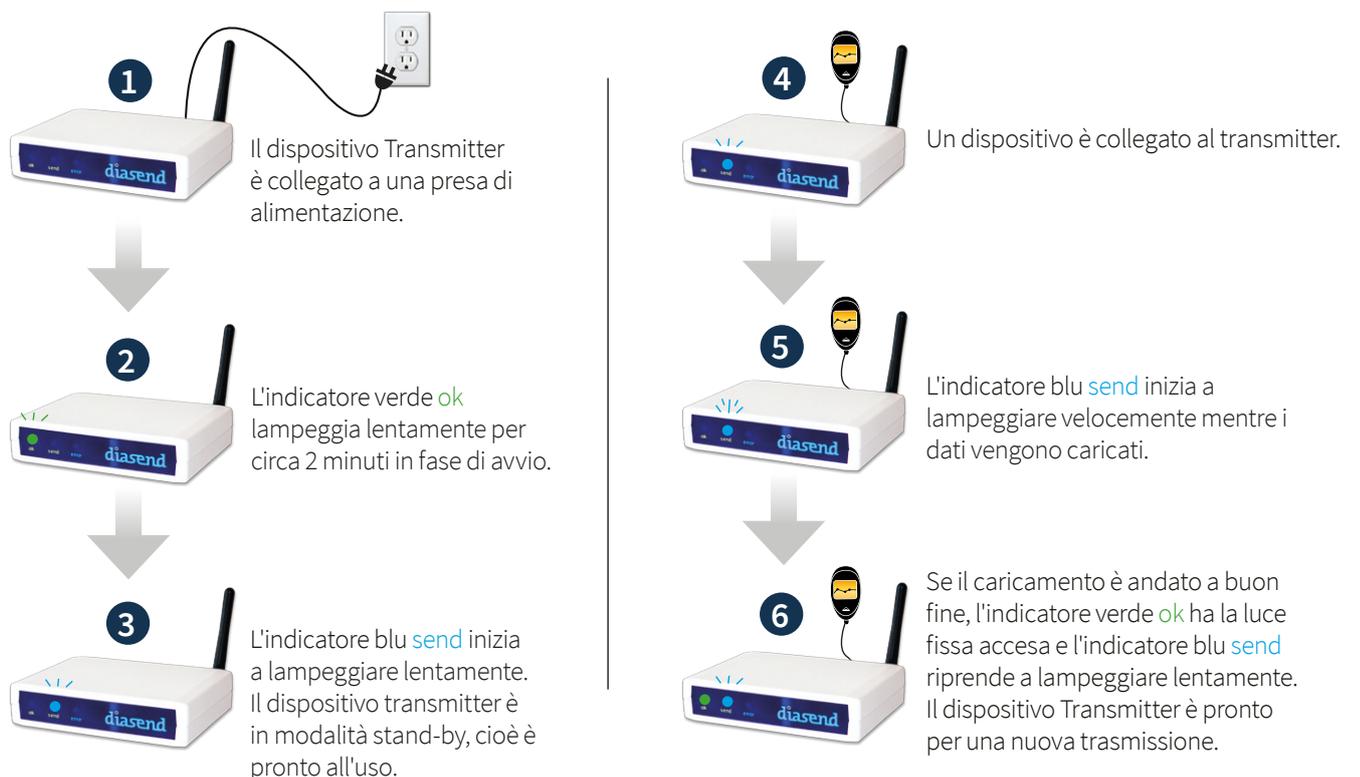

- 1 Il dispositivo Transmitter è collegato a una presa di alimentazione.
- 2 L'indicatore verde **ok** lampeggia lentamente per circa 2 minuti in fase di avvio.
- 3 L'indicatore blu **send** inizia a lampeggiare lentamente. Il dispositivo transmitter è in modalità stand-by, cioè è pronto all'uso.
- 4 Un dispositivo è collegato al transmitter.
- 5 L'indicatore blu **send** inizia a lampeggiare velocemente mentre i dati vengono caricati.
- 6 Se il caricamento è andato a buon fine, l'indicatore verde **ok** ha la luce fissa accesa e l'indicatore blu **send** riprende a lampeggiare lentamente. Il dispositivo Transmitter è pronto per una nuova trasmissione.

Elenco di dispositivi compatibili

Di seguito un elenco di dispositivi compatibili con diasend®. Se non vengono fornite istruzioni di caricamento esplicite per il dispositivo in uso, sarà sufficiente collegarlo al transmitter o all'hub USB con l'apposito cavo USB e verrà caricato automaticamente (visitare il sito diasend.com per visualizzare un elenco aggiornato dei dispositivi compatibili e dei limiti noti).

i Alcuni dei seguenti dispositivi per il paziente potrebbero non essere disponibili nel vostro mercato locale.



Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

i Assicurarsi che l'hub USB sia collegato a una presa di alimentazione e che l'hub USB sia collegato al dispositivo diasend® Transmitter.



Abbott

FreeStyle
FreeStyle Flash
FreeStyle Freedom
FreeStyle Freedom Lite
FreeStyle Lite
FreeStyle Mini
FreeStyle Optium

FreeStyle Optium H
FreeStyle Papillon
FreeStyle Papillon Lite
FreeStyle Papillon Mini
FreeStyle Papillon Vision
FreeStyle Xido
Optium Mini

Cavo USB Abbott FreeStyle (2,5 mm)



FreeStyle InsuLinx
FreeStyle Libre

FreeStyle Optium Neo
FreeStyle Papillon InsuLinx

Micro USB



FreeStyle Navigator II

Mini USB




FreeStyle Precision
FreeStyle Precision H
Optium Xceed

Optium Xido
Precision Xceed
Precision Xtra

Cavo USB Abbott Xceed




Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

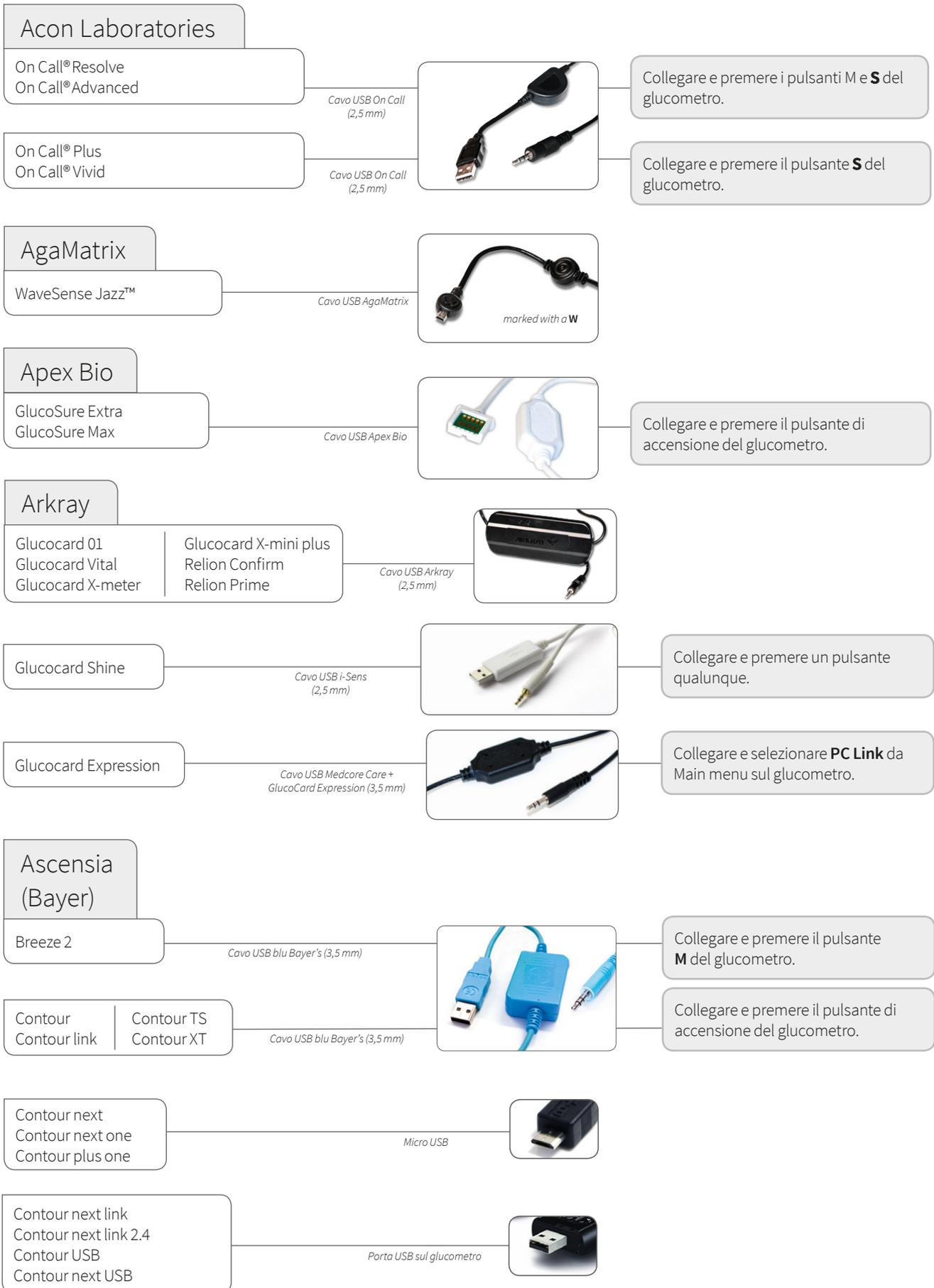


Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB




Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

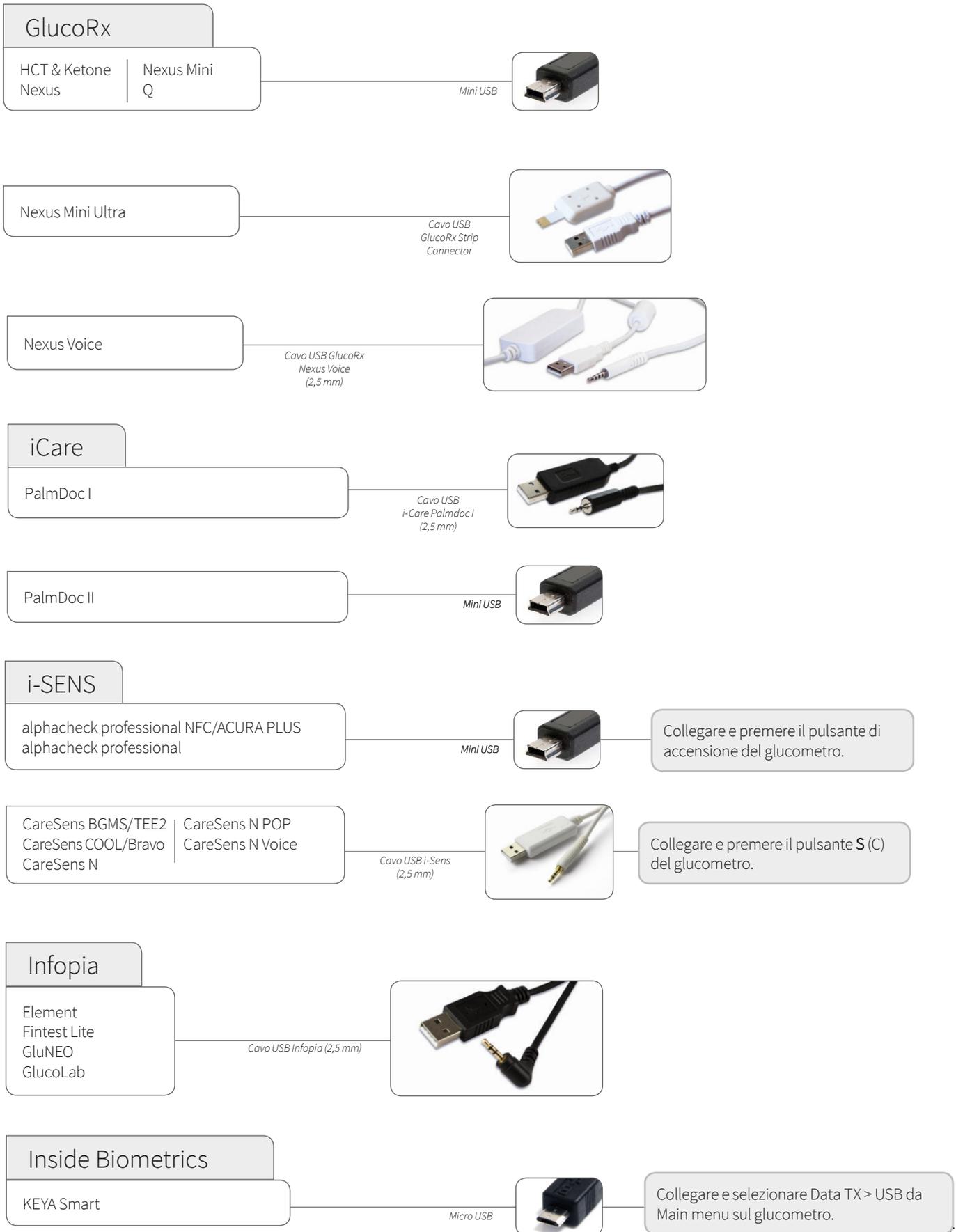

Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

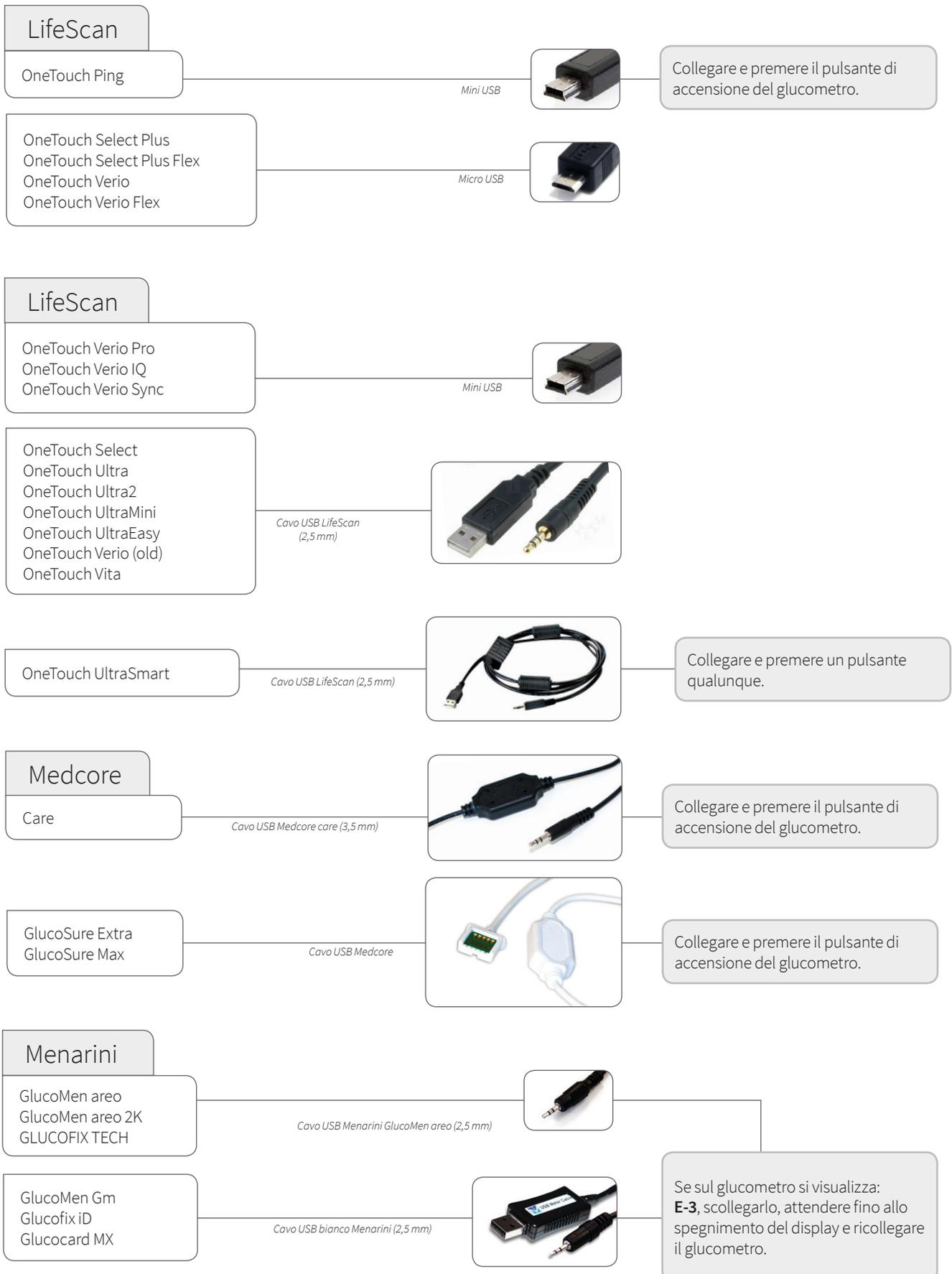

Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

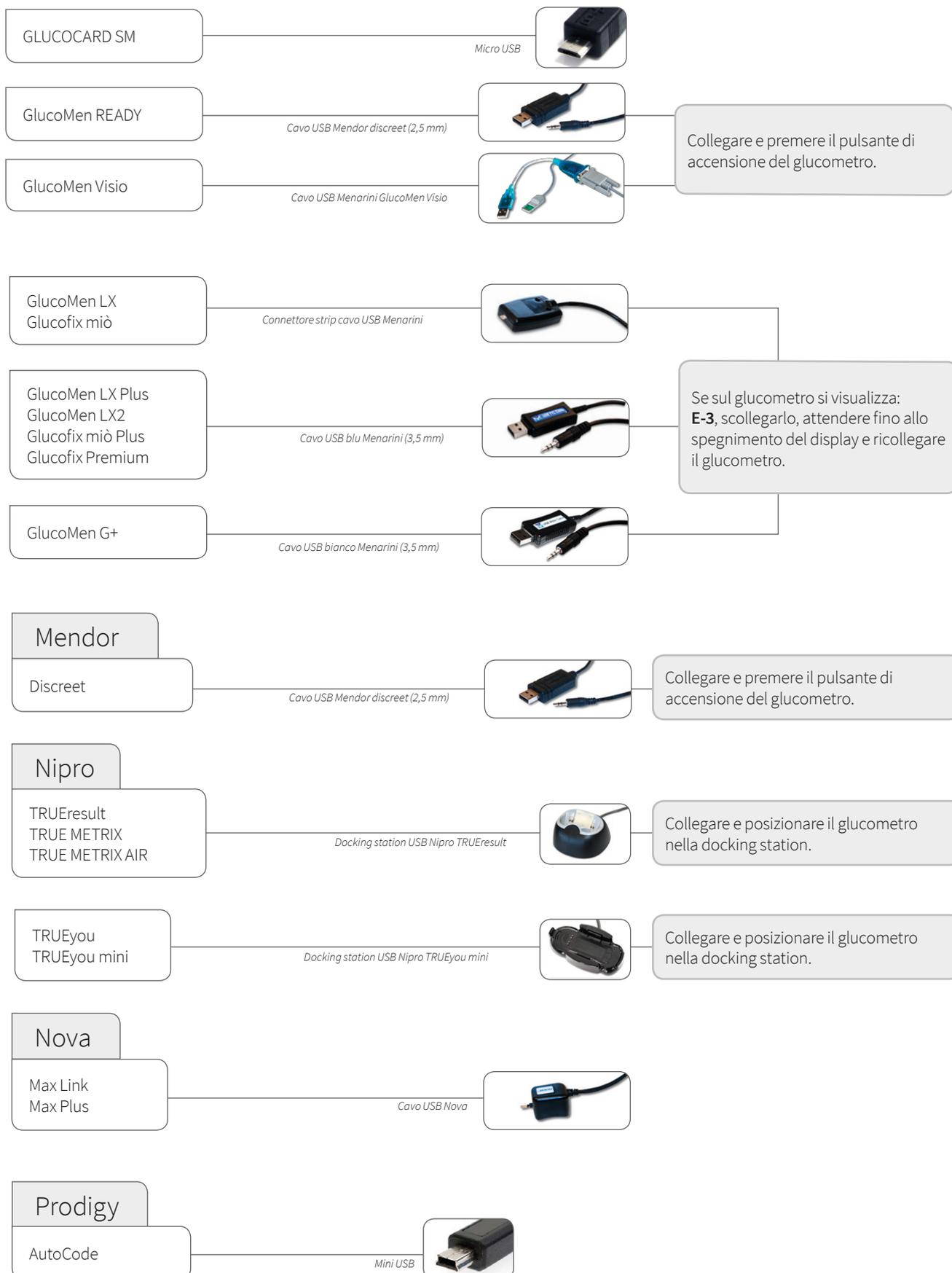

Glucometri e CGM – collegati tramite cavo USB

Roche Accu-Chek

Active
Mobile (USB)
Aviva Connect
Performa Connect

Guide
Instant
Instant S

Micro USB



Una volta connesso, il caricamento dovrebbe partire entro 20 secondi dalla connessione del cavo. In caso contrario, aprire Main menu sul glucometro. Andare alla voce **My data > Data Transfer > Reports**, e collegare di nuovo il glucometro al cavo USB.
(Non tenere premuti i due pulsanti freccia.)

Sanofi

BGStar
MyStar Extra

Cavo USB Sanofi



Senseonics

Eversense CGM Transmitter

NOTA!

Eversense Smart Transmitter (CGM) non può essere caricato con diasend® Transmitter.

I dati di Eversense CGM possono essere caricati solo su diasend® tramite "Collegati all'app" nell'account diasend® del paziente. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale d'uso per i pazienti sul sito:
<https://support.diasend.com>

Terumo

Finetouch

Cavo USB Terumo



Wellion

Calla Dialog

Cavo USB Wellion Calla (3,5 mm)



Collegare e selezionare **PC Link** da Main menu sul glucometro.

Calla Light
Calla Mini
Calla Premium

Cavo USB Wellion Calla mini



Linus

Cavo USB Wellion Linus



Ypsomed

mylife Pura

Cavo USB mylife Pura



mylife Unio

Mini USB





Glucometri a infrarossi

Impostare il glucometro in modalità di caricamento seguendo le istruzioni sotto riportate. Posizionare l'estremità superiore del glucometro verso il rilevatore a infrarossi sul diasend® Transmitter.

i Assicurarsi di mantenere il dispositivo completamente fermo durante il caricamento. Non rimuovere il dispositivo finché l'indicatore verde **ok** non si accende.

Rilevatore a infrarossi sul dispositivo Transmitter



Roche

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Nano
Accu-Chek Performa



Attivare la trasmissione IR tenendo premuti i due pulsanti freccia fino a quando compaiono due frecce sul display.

Accu-Chek Compact



Attivare la trasmissione IR tenendo premuti i due pulsanti superiori del glucometro fino a quando compaiono due frecce sul display.

Accu-Chek Compact Plus



Attivare la trasmissione IR tenendo premuti i pulsanti **S** e **M** sotto al display finché non compaiono due frecce sul display.

Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert



In Main menu, andare alla voce **My data** e selezionare **Data transfer**.

Accu-Chek Mobile (IR)



1. Tenere premuti i due pulsanti freccia.
2. Nel menu di trasferimento dei dati, selezionare la prima opzione (**for analysis**).
NOTA: Se il numero di serie del glucometro inizia con U1, fare riferimento alle istruzioni per Accu-Chek Mobile (USB) a pagina 16.

Glucometri bluetooth

Per trasmettere i dati dai dispositivi Bluetooth è necessario avere un adattatore USB Bluetooth. Il metodo di trasmissione Bluetooth richiede che il dispositivo si trovi in prossimità del diasend® Transmitter.



Abbott

FreeStyle Navigator



Dal glucometro, andare alla voce **Menu > System > Upload**. Selezionare e confermare per attivare.

FORACARE

FORA Diamond MINI



1. Per attivare il Bluetooth, accendere il glucometro tenendo premuto il pulsante di alimentazione.
2. Spegnere il glucometro tenendo premuto il pulsante di alimentazione. L'indicatore a LED nell'angolo in basso a destra del glucometro lampeggia in blu per indicare che il Bluetooth è attivato. Resta quindi acceso e fisso per indicare che è in corso il caricamento dei dati.

Nota: la versione supportata è quella con Bluetooth integrato.


Pompe per insulina – collegate tramite cavo USB standard




Pompe per insulina a infrarossi

Per le pompe Animas: Assicurarsi che la pompa sia sospesa e che lo schermo sia illuminato all'inizio della trasmissione (non è comunque necessario che lo schermo sia illuminato nel corso della trasmissione). Mantenere la pompa completamente ferma e non rimuoverla finché l'indicatore verde ok non si accende.

Rilevatore a infrarossi sul dispositivo Transmitter

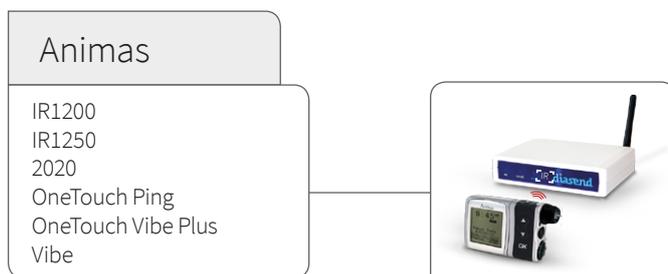

1. Sospendere la pompa. (**MAIN MENU**, andare alla voce **Suspnd/Resum** e premere **OK**; la voce **Suspend** viene evidenziata).
2. Premere **OK**.
3. Sistemare la pompa con la parte posteriore rivolta verso il rilevatore a infrarossi sul Transmitter.
4. Una volta terminata la trasmissione: riattivare la pompa (**MAIN MENU**, andare alla voce **Suspnd/Resum** e premere **OK**; la voce **Resume** viene evidenziata). Premere **OK**.

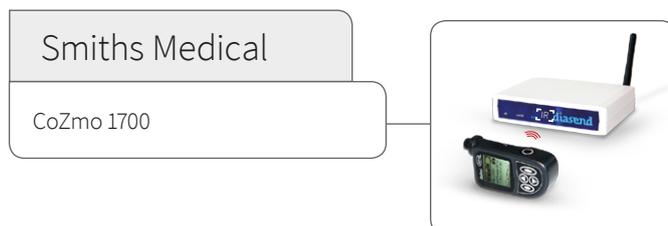

1. Premere il pulsante freccia giù per attivare la pompa.
2. Posizionare la pompa con il retro rivolto verso il centro del pannello anteriore del dispositivo diasend® Transmitter.

Nota: la batteria nella pompa per insulina CoZmo deve essere ben carica per consentire una trasmissione corretta e completa!



Pompe per insulina – collegate tramite cavi a infrarossi

Cavi a infrarossi compatibili


Cavo Roche Accu-Chek Smart Pix



Cavo Roche Accu-Chek Smart Pix 2



Roche
Accu-Chek Insight

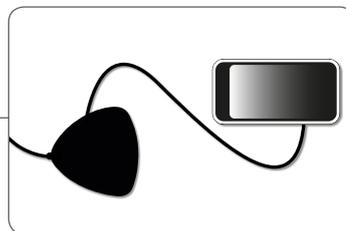

Smart Pix 2
Nota! Connettere il ricevitore della pompa con un cavo micro USB a Smart Pix 2.

1. Collegare il cavo Smart Pix 2 al Transmitter e attendere che l'indicatore blu su Smart Pix 2 inizi a lampeggiare lentamente.
2. Collegare il ricevitore a Smart Pix 2 utilizzando un cavo micro USB.
3. Nel menu del ricevitore, selezionare **Connect to PC** e premere **OK**.
4. Assicurarsi che la pompa rientri nella portata del ricevitore.
5. L'indicatore blu su Smart Pix 2 è attivo durante la trasmissione dei dati dal dispositivo a Smart Pix 2.
6. L'indicatore blu si spegne e sia Smart Pix 2 che il dispositivo emettono un suono per segnalare che è in corso la trasmissione dei dati da Smart Pix 2 al dispositivo Transmitter. Non scollegare ancora Smart Pix 2!
7. Attendere che il dispositivo Transmitter segnali l'avvenuto caricamento (l'indicatore verde ok è acceso e fisso).

Roche
Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix o Smart Pix 2
Nota! È richiesta la versione software Smart Pix 3.02 o superiore quando si utilizza Smart Pix.

1. Collegare Smart Pix al dispositivo Transmitter e attendere che l'indicatore blu su Smart Pix inizi a lampeggiare lentamente.
2. Portare la pompa in modalità **PC link** (fermare la pompa e accedere al menu **PC connection**).
3. Posizionare la pompa con la lente IR verso Smart Pix. L'indicatore blu segnala la trasmissione dei dati a Smart Pix.
4. Attendere che l'indicatore blu ricominci a lampeggiare lentamente o smetta di lampeggiare completamente.
5. I dati vengono ora trasmessi da Smart Pix al dispositivo Transmitter. Non scollegare ancora Smart Pix!
6. Attendere che il dispositivo Transmitter segnali l'avvenuto caricamento (l'indicatore verde ok è acceso e fisso).

Pompe per insulina Bluetooth

Per trasmettere i dati dai dispositivi Bluetooth è necessario avere un adattatore USB Bluetooth. Il metodo di trasmissione Bluetooth richiede che il dispositivo si trovi in prossimità del diasend® Transmitter.



SOOIL
DANA Diabecare R



1. Selezionare **Main menu**.
2. Andare alla voce **Setting**.
3. Selezionare **Discovery**.
4. L'indicatore send dovrebbe iniziare a lampeggiare rapidamente. Se ciò non accade e la pompa si spegne, riprovare.
5. Attendere finché l'indicatore send smette di lampeggiare rapidamente e l'indicatore ok si accende.

Penne per insulina – collegate tramite cavo USB standard

Per trasmettere i dati da una penna per insulina, attenersi alle seguenti istruzioni.

 Assicurarsi che l'hub USB sia collegato a una presa di alimentazione e che l'hub USB sia collegato al dispositivo diasend® Transmitter.



Pendiq
pendiq



Assicurarsi che il cavo sia inserito correttamente. La spia di controllo della penna da insulina inizierà a lampeggiare e lo scaricamento inizierà dopo 10-15 secondi.



AVVISO!

Tutte le diagnosi e i trattamenti medici dei pazienti devono essere effettuati sotto la supervisione di personale sanitario qualificato! diasend® non è pensato per fornire decisioni automatizzate sul trattamento e non va usato in sostituzione delle valutazioni del personale sanitario. diasend® non è pensato per effettuare chiamate di emergenza o per la trasmissione o indicazione di allarmi in tempo reale o dati di importanza immediata! diasend® non è pensato per sostituire la supervisione medica o per interventi di emergenza.

Centro assistenza

02 509051

www.diasend.com



A2032v8L QG_IT_diasend-clinic (2018-05-24)

diasend® è indicato per l'uso da parte di singoli o professionisti sanitari a casa o in strutture sanitarie per la trasmissione dei dati dai dispositivi di monitoraggio domestici, come ad esempio i glucometri e le pompe per insulina, a un database sul server a supporto della gestione dei pazienti diabetici. diasend® è indicato per l'uso professionale e da banco.