

Come copiare le impostazioni nella **nuova pompa t:slim X2**



Your Health, Our Mission



IMPORTANTE

- Se la pompa da cui si devono recuperare le informazioni ha un guasto che non rende disponibile l'accesso alle impostazioni, questi dati possono essere recuperati dallo scarico dati sul proprio **Account** della piattaforma utilizzata
- Se i dati non sono stati scaricati rivolgersi SEMPRE al proprio diabetologo per recuperare le impostazioni necessarie

ACCENSIONE POMPA T:SLIM X2

- Collegare la pompa alla presa di corrente utilizzando il cavo USB ed il trasformatore forniti nella confezione originale
- La pompa si accende in autonomia dopo 30-45 secondi (se molto scarica potrebbe essere necessario più tempo) con la comparsa della schermata di blocco. Il livello della batteria all'accensione viene visualizzato al 5%, dopo qualche secondo compare il reale livello della batteria
- È consigliato **lasciare la pompa sotto carica fino al raggiungimento del 100%**
- Sbloccare la pompa (1, 2, 3), selezionare la lingua e premere AVVIA



Impostazione pompa t:slim X2

Selezionare Opzioni, La mia pompa, Avvisi e Promemoria

- **Avvisi Pompa:** **Verificare che Auto-OFF sia disattivato**
Insulina bassa: impostare questo avviso tenendo conto del **fabbisogno insulinico giornaliero** (boli + basale = Dose Totale Giornaliera)

Selezionare Opzioni, Imp. Dispositivo

- **Impostazioni Display:** Impostare Time-out schermo a **120 sec** (suggerito)
- **Ora e data:** **Verificare SEMPRE che sia corretta**
- **Volume Audio:** Personalizzare i volumi, in questa schermata si trovano anche gli **Avvisi CGM**
- **Pin di sicurezza:** Se la pompa viene utilizzata in **età pediatrica** è fortemente consigliato impostare il Pin di sicurezza (in caso non si ricordasse il Pin di sicurezza impostato, è possibile sbloccare la pompa utilizzando il Pin di Fabbrica: **314159**)

Impostazione pompa t:slim X2



Selezionare Opzioni, La mia pompa, Profili personali

- **Impostazioni pompa:** **Bolo max:** deve essere impostato tenendo conto del massimo bolo che viene somministrato (ad es: bolo «pizza»)
Limite basale: deve essere impostato valutando la velocità basale massima utilizzata in tutti i profili personali programmati
- **Profili personali:** Inserire in ogni **Profilo personale: Velocità basale, FSI, I:C, Target glicemia** ed in **Impostazioni bolo: Durata Insulina Attiva e attivare opzione Carb (ON)** se utilizzata (obbligatorio con la tecnologia Control-IQ per poterla attivare)
Importante: NON invertire i parametri FSI con I:C

Impostazione pompa t:slim X2



Selezionare [Opzioni, Il mio CGM](#)

- **Avvisi CGM:** Inserire gli **Avvisi di glicemia alta, bassa e ripetizione**
L'**avviso di Fuori range** è impostato di default a 20 minuti
- **Dexcom G6:** **Inserire l'ID del trasmettitore**
 - 1) Trasmettitore già in uso con la pompa precedente e sessione CGM attiva:
 - Spegnere la pompa, se funzionante, (SENZA arrestare la sessione CGM) collegandola alla corrente e tenendo premuto il tasto in alto Schermo ON/Bolo rapido per 45 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico
 - **Attendere 15 minuti** prima di inserire l'ID nella nuova pompa
 - Avviare la sessione CGM SENZA inserire il codice sensore (selezionare Ignora); dopo 10 minuti la sessione si ricollega
 - 2) Trasmettitore già in uso con la pompa precedente e sessione CGM NON attiva:
 - Spegnere la pompa, se funzionante, collegandola alla corrente e tenendo premuto il tasto in alto Schermo ON/Bolo rapido per 45 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.
 - **Attendere 15 minuti** prima di inserire l'ID nella nuova pompa
 - Avviare la sessione CGM inserendo il codice sensore
- **Dexcom G7:**
 - Spegnere la vecchia pompa, se funzionante, collegandola alla corrente e tenendo premuto il tasto in alto Schermo ON/Bolo rapido per 45 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico
 - **Attendere 15 minuti** e avviare la sessione CGM sulla nuova pompa inserendo il codice sensore (se la sessione CGM è già attiva oppure occorre avviarne una nuova)

Impostazione pompa t:slim X2

Se si utilizza una pompa t:slim X2 con tecnologia Control-IQ

Selezionare Opzioni, La mia pompa, Control-IQ

- **Inserire Peso e Dose Totale Giornaliera** (recuperare l'informazione aggiornata nella vecchia pompa (cronologia pompa > Riepilogo erogazioni > media 14 giorni) oppure dallo scarico dati Diasend-Glooko nella pagina Riepilogo)
- **Attivare la funzione Control-IQ (ON)**

Selezionare Opzioni, Attività

- **Impostare almeno 1 programma Sonno.** Se occorre inserire 2 programmi Sonno uno per la settimana lavorativa e uno per il fine settimana valutare se l'orario di inizio è riferito ad un giorno e quello del risveglio è riferito al giorno successivo. *Per es. se vado sempre a dormire alle 23:00 e mi sveglio alle 7:00 da lunedì a venerdì e alle 9:00 il sabato e la domenica dovrò inserire 1 programma sonno da domenica a giovedì dalle 23:00 alle 7:00 ed 1 programma sonno venerdì e sabato dalle 23:00 alle 9:00*