

# ATTENZIONE - INFORMAZIONE IMPORTANTE

Gentile utilizzatore, la tua pompa Tandem t:slim X2 dispone di un software aggiornato alla **versione 7.7**. Di seguito troverai le principali novità introdotte.

## ICONE DEL BOLO VISUALIZZATE SUL GRAFICO CGM

Dopo la somministrazione di un bolo, verrà visualizzata un'icona quadrata blu nella parte inferiore del grafico CGM. L'icona si sposterà a sinistra con il passare del tempo seguendo la linea temporale del grafico CGM. A seconda del bolo somministrato, potrebbero essere visualizzate tre diverse icone.



## OPZIONI PER IL RIEMPIMENTO DELLA CANNULA

Le opzioni preimpostate per il Riempimento Cannula sono ora **0.3 U, 0.5 U, 0.7 U**, ed è comunque possibile selezionare "Altra quantità" per inserire una quantità personalizzata, se necessario.

L'impostazione predefinita è 0.3 U.

## ALLARME PERSONALIZZATO PER RIPRENDERE L'INSULINA

Dopo l'interruzione manuale dell'erogazione di insulina, è possibile personalizzare il tempo di notifica dell'allarme che ricorda di riprendere l'erogazione.

L'impostazione predefinita è 15 minuti, ma è possibile modificarla a **30, 45 o 60 minuti**.

Quando è trascorso il periodo di tempo selezionato, la pompa notificherà un allarme per ricordare all'utente di riprendere manualmente l'erogazione di insulina. Occorrerà riprendere l'erogazione dell'insulina manualmente dopo aver confermato tale l'allarme.

## TIMER ATTIVITÀ FISICA E TRANSIZIONE ATTIVITÀ

L'attività **Esercizio** ora può essere avviata/arrestata manualmente oppure è possibile impostare un **timer** che consente di programmare la durata (**30 min – 8 ore**).

Se l'Attività Esercizio è attiva nel momento in cui è programmato l'avvio di un **Programma Sonno**, il Programma Sonno non inizierà. Tuttavia, se la durata pianificata termina o se l'Attività Esercizio viene arrestata manualmente durante l'intervallo di tempo in cui è attivo un Programma Sonno, il Programma Sonno si avvierà automaticamente.



### AVVISO GLICEMIA ALTA CONTROL-IQ

Se la glicemia è superiore a **200 mg/dL** e non prevede una diminuzione della glicemia nei **30 minuti successivi** apparirà l'avviso Control-IQ glicemia alta. Una volta confermato questo avviso si presenterà **dopo 2 ore** se tale condizione persiste.

### AVVISO SCADENZA SENSORE

La pompa indica quanto tempo manca al completamento della sessione del sensore per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM). La schermata "Il sensore scadrà a breve" mostrerà ora le 24 ore rimanenti anziché le sei ore rimanenti. Verranno inoltre visualizzate le due ore rimanenti e i 30 minuti rimanenti prima del termine della sessione.

Gli utilizzatori del monitoraggio Dexcom G7, visualizzeranno un ulteriore avviso che li informerà di un periodo aggiuntivo pari a 12 ore, detto Periodo di Tolleranza, in cui le letture continueranno ad essere visualizzate.

### ALLARME AUTO-OFF

La pompa può interrompere l'erogazione di insulina e avvisarti se non ci sono state interazioni con la pompa entro un determinato periodo di tempo. L'**impostazione predefinita** per questo allarme ora è su **Off**.

### ! SELEZIONA SENSORE

Con questo nuovo software della pompa, puoi utilizzare sia il **monitoraggio Dexcom G6 che Dexcom G7**. Quando selezioni **Il mio CGM** dal menu **Opzioni**, ti verrà chiesto di scegliere il tipo di sensore. Se devi modificare il tipo di sensore in uso, nel menù **Il mio CGM** cerca la voce **modifica tipo di sensore utilizzando le frecce per muoverti nelle pagine**.

La guida per l'utente della pompa per insulina t: slim X2 può essere scaricata al seguente link:  
[https://urly.it/3z\\_-w](https://urly.it/3z_-w)

Registrati al sito <https://movi-elab.it/> o inquadra il **QR code** per scoprire l'area di assistenza online e tanti contenuti di supporto per la gestione della pompa Tandem t:slim X2 e il sistema di monitoraggio Dexcom.

Se necessiti formazione sul prodotto, invia un'e-mail a [tandemdiabetes@movigroup.com](mailto:tandemdiabetes@movigroup.com).

Per importanti informazioni sulla sicurezza relative alla tua pompa per insulina t: slim X2 sostitutiva, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, visita il sito [tandemdiabetes.com/safetyinfo](http://tandemdiabetes.com/safetyinfo).



ISTR-DB-005



#### MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio 15, 20138 Milano  
Tel. +39 02 509051 - Fax +39 02 5061048  
[www.movigroup.com](http://www.movigroup.com)  
Numero Verde: 800-272777

Assistenza Tecnica relativa alla  
piattaforma di scarico dati Glooko  
**NUMERO VERDE: 800.790.727**  
Dalle 08:00 alle 17:00  
Mail: [help@glooko.com](mailto:help@glooko.com)

Assistenza Tecnica relativa alla pompa, al CGM e materiale di consumo  
**NUMERO VERDE: 800.27.27.77**  
**24/7**  
Dall'Estero:  
Telefono: +39 081 19983409  
Mail: [dbservice@movigroup.com](mailto:dbservice@movigroup.com)