


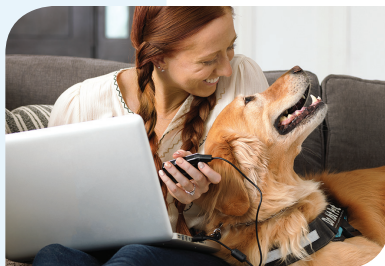


Accedere alla pagina:

source.tandemdiabetes.com




Creare un Account

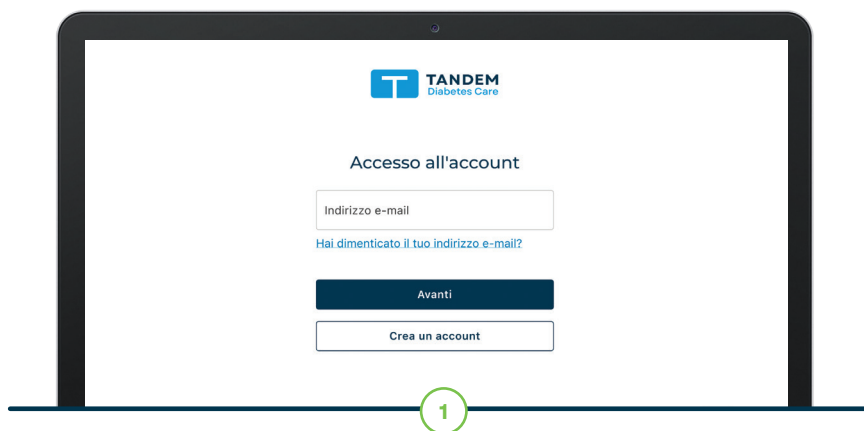

Se si dispone già di un account Tandem, eseguire l'accesso utilizzando email e password utilizzate in fase di registrazione.

- ✓ Se non si dispone di un account Tandem, cliccare su **Crea Account**, e seguire le indicazioni. Verrà inviata una mail di verifica per l'attivazione dell'account.

Condividere un Account

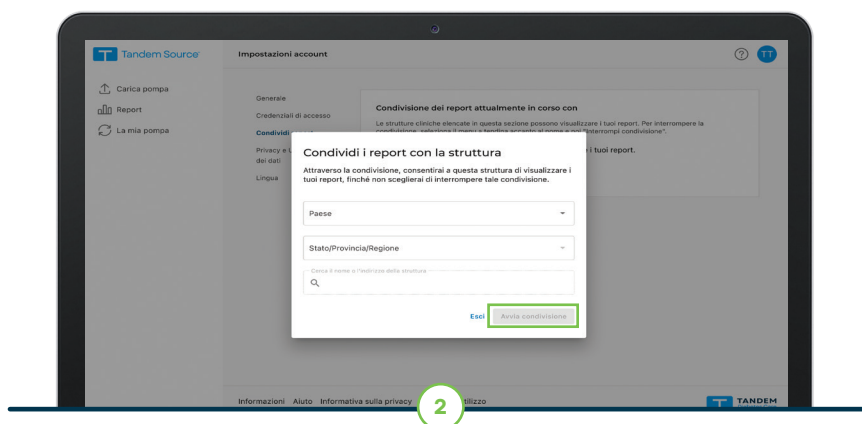


Cliccare sul cerchio con le proprie iniziali nell'angolo in alto a destra.


1. Andare nella schermata **Impostazioni Account** cliccando sul cerchio blu in alto a destra
2. Cliccare su **Condividi report**
3. Cliccare su **Aggiungi struttura clinica** per cercare la struttura sanitaria
4. Ricercare la struttura clinica per nome o indirizzo
5. Selezionare la struttura sanitaria e cliccare su **Avvia condivisione**

Scaricare i dati dalla pompa

- ✓ Cliccare su **Carica Pompa** nella barra di navigazione a sinistra
- ✓ Collegare la pompa al computer usando il cavo USB in dotazione

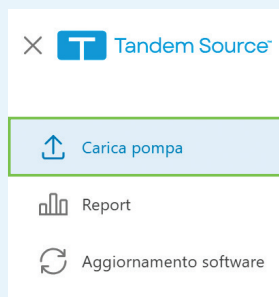

Potrebbe comparire un pop-up che notifica che source.tandemdiabetes.com desidera connettersi a una porta seriale. Cliccare su Porta COM Virtuale Tandem per evidenziarla e cliccare su **Connetti**.

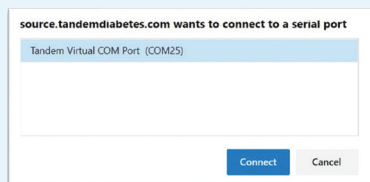

- ✓ Cliccare su **Avvia caricamento** per iniziare a scaricare i dati
- ✓ **La prima volta** che si esegue lo scarico dati verrà chiesto di associare la pompa. Selezionare **Associa Pompa**.
- ✓ Non scollegarla prima di aver visualizzato il segno di spunta che conferma che il caricamento dei dati è stato completato con successo



La piattaforma Tandem Source è progettata per essere utilizzata da individui affetti da diabete mellito che utilizzano le pompe per insulina Tandem Diabetes Care, dai loro caregiver e dai loro professionisti sanitari a domicilio e in contesti clinici. La piattaforma Tandem Source agevola la gestione del diabete tramite la visualizzazione e l'analisi delle informazioni caricate dalle pompe per insulina Tandem.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, i loghi Tandem, Tandem Source e t:slim X2 sono marchi commerciali registrati o marchi commerciali di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti i marchi di terze parti sono proprietà dei rispettivi proprietari. ML-1014688_A

Numero Verde dedicato agli utilizzatori:
800.272.777



TANDEM
Diabetes Care

Tandem Source

tandemdiabetes.com