




COME CREARE UN ACCOUNT PERSONALE DALLA PIATTAFORMA WEB DI SCARICO DATI TANDEM SOURCE



Come creare un account Utente personale

Nel caso in cui sia già in uso la **Tandem t:slim Mobile App** non sarà necessario creare un ulteriore Account personale; per accedere alla **Piattaforma web** utilizzare le **stesse credenziali della Mobile App**


1. **Accedere** alla pagina <https://source.tandemdiabetes.com/>
2. Selezionare **Crea un Account**
3. **Selezionare il tipo di account:** Utilizzo personale o Utilizzo come genitore/tutore

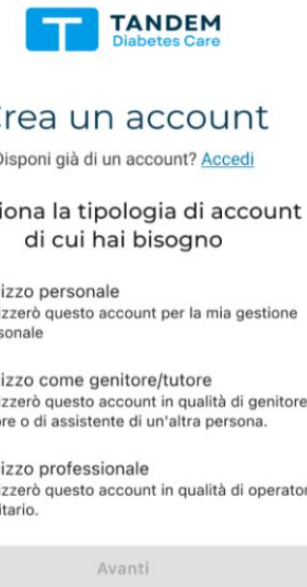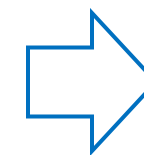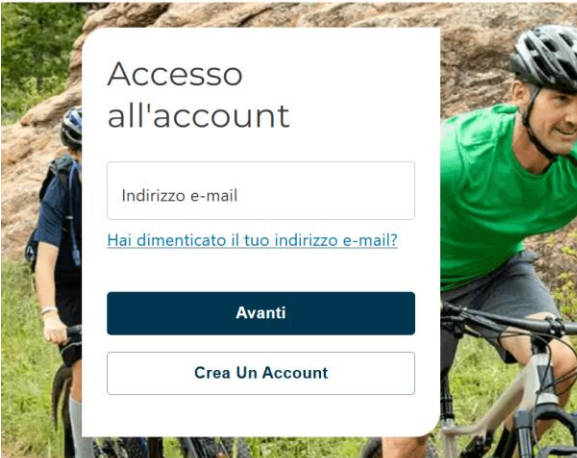

NOTA: i Browser compatibili con la Piattaforma sono: **Chrome, Edge e Safari**

4. Compilare le informazioni richieste dalla piattaforma

5. Controllare la mail per Attivare l'account



Crea un account

Disponi già di un account? [Accedi](#)

Informazioni sul paziente

Paese

Italia

Regione

Data di nascita


Dati dell'account

Lingua

Italiano

Confermare

Torna Indietro



Rivedi account

Rivedi i passaggi indicati di seguito per procedere.


Per informazioni sulle modalità di trattamento da parte di Tandem dei suoi dati personali e, se del caso, della persona a suo carico, si prega di consultare l'[Informativa sulla Privacy](#) di Tandem. Nella fase successiva alla creazione dell'account, potrà effettuare ulteriori scelte su come Tandem può utilizzare i suoi dati e quelli della persona a suo carico.

Spunta le seguenti caselle per accettare e continuare.

☐ Accetto le [Condizioni d'Uso](#) di Tandem.

Continua

Torna Indietro



Scelte dei dati

Facci sapere se possiamo utilizzare i tuoi dati per gli scopi illustrati di seguito. Essi ci aiutano a migliorare la tua esperienza e i nostri prodotti.

Miglioramento del Prodotto

Per valutare e migliorare l'utilizzo, l'esperienza e le prestazioni dei nostri prodotti e per sviluppare nuove funzionalità e prodotti.

Ricerca e Pubblicazione

Per analizzare i modelli tra diverse aree geografiche, prodotti e popolazioni per valutare l'impatto dei nostri prodotti e produrre pubblicazioni.

Sviluppo Aziendale

Per migliorare le nostre operazioni commerciali, migliorare l'esperienza dei clienti ed espandere la presenza sul mercato.

È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento nella sezione Privacy e Utilizzo dei Dati delle Impostazioni dell'Account.

Consenti Tutti

Consenti Solo Selezionati

Rifiuta Tutti

Torna Indietro



Controlla il tuo indirizzo e-mail per attivare l'account.

Ti è stata inviata un'e-mail per l'attivazione dell'account Tandem Diabetes Care. Segui le istruzioni ivi contenute per attivare il tuo account.

6. Concludere la creazione dell'account scegliendo una password

7. E' ora possibile accedere alla piattaforma



Attiva account

Ciao

È stato avviato un account Tandem Diabetes Care. Clicca sul pulsante qui sotto per completare la procedura di creazione dell'account e procedere con l'attivazione.

[Attiva il tuo account](#)

E-mail di accesso:

questa e-mail ti è stata inviata attraverso un sistema automatizzato. Ti preghiamo di non rispondere a questo messaggio.

[Supporto clienti](#)



Crea un account

Completa la creazione del tuo account inserendo le seguenti informazioni.

Requisiti della password:

- Almeno 8 caratteri
- Almeno 1 numero
- Almeno 1 lettera minuscola
- Almeno 1 lettera maiuscola
- Almeno 1 simbolo ⓘ

Password



Sicurezza della password: N/A

Conferma password



System Security Check



Stiamo verificando che tu non sia un robot



Fine



Accesso all'account

Indirizzo e-mail

[Hai dimenticato il tuo indirizzo e-mail?](#)

Avanti

Crea Un Account

Accesso a Tandem Source Personale


Una volta loggato, si avrà la possibilità di:

- **Caricare i dati** della pompa (se si utilizza la Mobile App i dati vengono inviati automaticamente alla piattaforma)
- **Visualizzare i dati e i report** della terapia
- **Visualizzare la pompa** associata all'Account
- **Aggiornare il software** della pompa




 Home

 Carica dati pompa

 Report

 La mia pompa

 Aggiornamento software



COME ASSOCIARE UNA POMPA AL PROPRIO ACCOUNT PERSONALE



Your Health, Our Mission

Come collegare una pompa a un account personale

1. Cliccare su **Carica dati pompa** nella barra di navigazione a sinistra, collegare la pompa e poi cliccare su **Avvia caricamento**

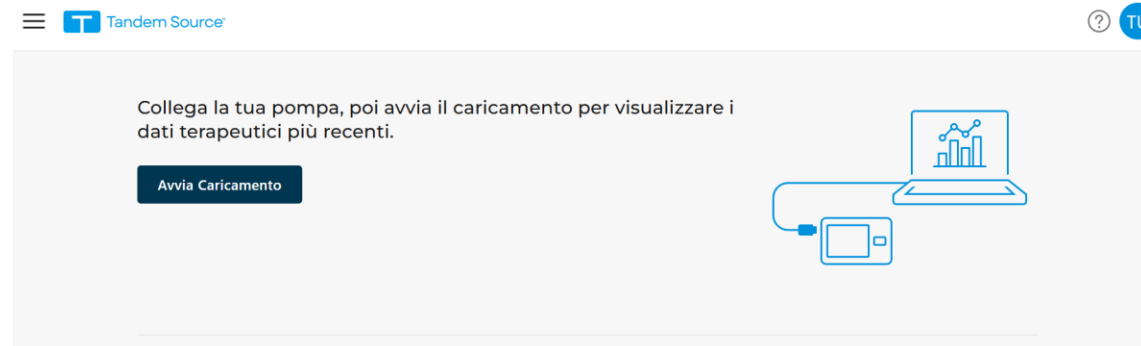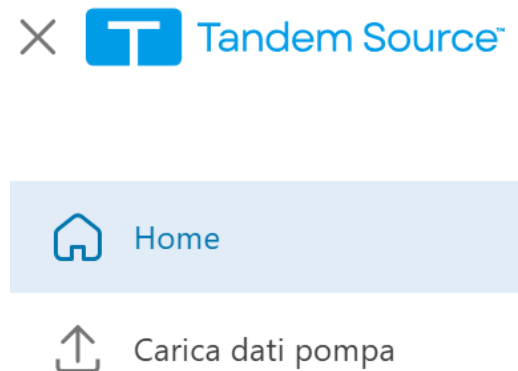


2. Cliccare su **Associa Pompa** per collegare il proprio account, scaricare e visualizzare i dati della pompa





NOTA BENE

Quando viene collegata la pompa al PC il sistema potrebbe chiedere di autorizzare il collegamento alla porta seriale del computer.
Evidenziare la porta e fare clic su CONNETTI.

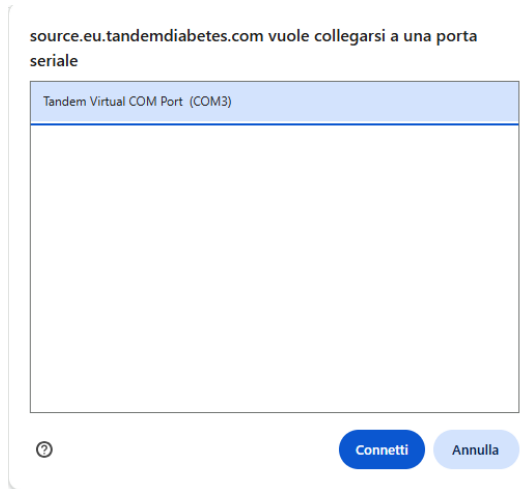

Come condividere i propri dati con il Centro Diabetologico

Cliccare sull'icona del proprio profilo nell'angolo in alto a destra, quindi cliccare su **Impostazioni Account**, Cliccare su **Condividi Report**, poi su **Aggiungi Struttura Clinica**. Cercare la propria struttura clinica e fare **Avvia Condivisione**



Impostazioni account

Uscire



Tandem Source

Generale

Credenziali di accesso

Condividi report

Privacy e Utilizzo dei dati

Lingua



Aggiungi Struttura Clinica

Condividi i report con la struttura clinica

Attraverso la condivisione, consentirai a questa struttura clinica di visualizzare i tuoi report, finché non sceglierai di interrompere tale condivisione.

Paese

Italia

Regione

Cerca il nome o l'indirizzo della struttura



Esci

Avvia Condivisione

GRAZIE



Your Health, Our Mission