

Per procedere all'impostazione della tua nuova pompa Tandem t:slim X2 segui le indicazioni sotto riportate:

Prima di cominciare ti suggeriamo di caricare la batteria della pompa fino a raggiungere il 100%

Seleziona > Opzioni, La mia pompa, Avvisi e Promemoria

Avvisi Pompa: Ti suggeriamo di impostarli secondo le tue necessità

Seleziona Opzioni, Imp. Dispositivo

Ora e data: Verifica **SEMPRE** che sia corretta

Pin di sicurezza: Se la pompa viene utilizzata in **età pediatrica** è fortemente consigliato impostare il **Pin di sicurezza**

Seleziona > Opzioni, La mia pompa, Profili personali

Impostazioni pompa:

Bolo max: Ti suggeriamo di impostarlo tenendo conto del massimo bolo che viene somministrato

Limite basale: Ti suggeriamo di impostarlo valutando la velocità basale massima utilizzata in tutti i profili personali programmati

Profili personali: Inserisci in ogni **Profilo personale:** Velocità basale, FSI, I:C, Target glicemia ed in **Impostazioni bolo:** Durata Insulina Attiva e attivare **opzione Carb (ON)** se utilizzata (obbligatorio con la tecnologia Control-IQ per poterla attivare)

Seleziona > Opzioni, Il mio CGM

Avvisi CGM: Ti suggeriamo di impostarli secondo le tue necessità

Dexcom G6: Inserire l'ID del trasmettitore

Se il trasmettitore è già in uso con la pompa precedente, **non arrestare la sessione CGM se attiva**. Spegnerla la vecchia pompa (se funzionante) collegandola alla corrente e tenendo premuto il tasto superiore (Schermo ON/Bolo rapido) per 45 secondi fino al segnale acustico. Attendere 15 minuti prima di inserire l'ID trasmettitore nella nuova pompa

Se la sessione CGM è attiva, avviare la sessione CGM sulla nuova pompa **SENZA** inserire il codice sensore (selezionare "Ignora"): dopo circa 10 minuti la sessione si ricollegherà

Se la sessione CGM non è attiva, avviare la sessione sulla nuova pompa inserendo il codice sensore

Dexcom G7: Spegnerla la vecchia pompa, se funzionante, collegandola alla corrente e tenendo premuto il tasto in alto Schermo ON/Bolo rapido per 45 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico, attendere 15 minuti e avviare la sessione CGM sulla nuova pompa inserendo il codice sensore (se la sessione CGM è già attiva oppure occorre avviarne una nuova)

Se si utilizza una pompa t:slim X2 con tecnologia Control-IQ

Seleziona > Opzioni, La mia pompa, Control-IQ

Inserire Peso e Dose Totale Giornaliera recuperare l'informazione aggiornata nella vecchia pompa, se disponibile, (*cronologia pompa > Riepilogo erogazioni > media 14 giorni*) o, in alternativa attraverso la piattaforma di scarico dati in uso **Attivare la funzione Control-IQ (ON)**

Seleziona > Opzioni, Attività

È suggerito impostare almeno 1 programma Sonno

All'interno della piattaforma e-Lab <https://movi-elab.it/> scopri l'area di assistenza tecnica online e tanti contenuti di supporto per la gestione della tua pompa Tandem t:slim X2 e del sistema di monitoraggio in continuo Dexcom.

Per importanti informazioni sulla sicurezza relative alla tua pompa per insulina t:slim X2, comprese indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni, visita il sito tandemdiabetes.com/safetyinfo.

Cordialmente
Movi S.p.A.